

# Adaptateur de sonde jetable

Pièce numéro 2508-P-8026

## Mode d'emploi

### 1 Avis et précautions

- Ne doit être utilisé qu'avec le Keeler Cryomatic (2509-P-1000) et la sonde Cryo jetable (2508-P-7022)
- Vérifiez la sonde avant l'emploi – ne vous en servez pas et ne la réparez pas si elle est endommagée ou déformée
- Ne déconnectez la sonde de l'adaptateur qu'après avoir dépressurisé le système
- Pression maximum 5860kPa (850psi)

- En cas de doute, consultez la notice d'utilisation du Cryomatic
- Toute intervention non autorisée aura pour effet d'invalider la garantie
- Cet adaptateur ne sera utilisé que par un personnel chevronné, formé dans l'utilisation des équipements ophtalmologiques
- La loi fédérale des Etats-Uni limite la vente de cet adaptateur ou son utilisation sur ordre d'un médecin

### 2 Utilisation

Connectez l'adaptateur de sonde à la console Cryomatic en alignant l'élément d'accouplement sur les ergots de la console puis en poussant dessus jusqu'à ce qu'un déclic positif soit entendu (il est impossible de connecter l'élément d'accouplement dans le mauvais sens – l'orientation correcte s'obtient lorsque le bouton de déclenchement se trouve sur le haut).

Connectez la sonde jetable en introduisant le connecteur de la sonde dans l'adaptateur puis en poussant sur la sonde fermement et directement contre la bague (1).

Le loquet de sécurité (2) se mettra en oeuvre et l'anneau de blocage (3) s'avancera vers la sonde, confirmant ainsi que celle-ci a été correctement connectée.

**Avant d'utiliser la sonde veillez à ce que le clip de sécurité arrière (4) soit totalement abaissé – vous ne devez jamais vous en servir si le clip de sécurité ne se trouve pas dans cette position (voir l'illustration en page 2).**




Le système lance automatiquement un cycle de purge de 90 secondes. Pendant ce cycle de purge, un symbole d'attente animé est affiché à côté du symbole représentant la sonde.



Trois bips de courte durée signalent la fin du cycle de purge. L'équipement est alors prêt pour l'emploi comme indiqué par le sablier et le symbole "Prêt".

Les cycles de congélation peuvent alors être contrôlés par la pédale du Cryomatic de la manière normale (voir la notice d'utilisation du Cryomatic).

Suite au verso ►

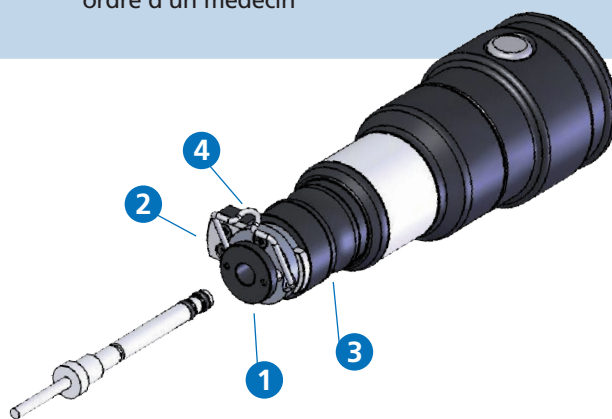

### 3 Symboles

**STERILE EO** Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Fabricant



Attention

La marque CE sur ce produit indique

que celui-ci a été testé et qu'il se conforme aux dispositions de la directive 93/42/CEE sur les appareils médicaux



Ne pas réutiliser



Date limite d'utilisation



Code du lot/Numéro du stock/  
Numéro du lot



Consultez la notice d'utilisation



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage et dans la notice d'utilisation indique que le produit a été mis sur le marché après le mois d'août 2005, et qu'il ne doit pas être traité comme déchet ménager. UE seulement.

## 4 Déconnexion de la sonde jetable

 La sonde jetable ne doit être déconnectée de l'adaptateur qu'après la dépressurisation du système indiquée par le symbole "prêt".

Pour déconnecter la sonde jetable de l'adaptateur de sonde, éloignez l'anneau de blocage (1) de la sonde jetable et actionnez le loquet (2).

La sonde jetable devra être éjectée doucement de l'adaptateur. Relevez le clip de sécurité (3) et détachez de l'adaptateur le connecteur de la sonde jetable.

Vous pourrez détacher l'adaptateur de sonde lui-même de la console du Cryomatic en appuyant sur le bouton de déclenchement (4).



## 5 Nettoyage, maintenance et mise au rebut

En cas de besoin, vous pourrez nettoyer l'adaptateur de sonde au moyen d'un linge jetable trempé dans un détergent doux et de l'eau tiède. Les produits ou tampons abrasifs sont à proscrire. L'utilisateur évitera de mouiller les contacts électriques pendant le nettoyage.

L'adaptateur de sonde ne comportant aucune pièce réparable par l'utilisateur, sa maintenance consiste uniquement à vérifier l'état de l'adaptateur avant son utilisation en vue de déceler des signes éventuels d'endommagement.

L'adaptateur de sonde sera examiné tous les ans par un personnel formé par Keeler.

**Les réparations ne seront effectuées que par un personnel formé par Keeler ou par ses représentants.**

Veillez à ce que cet équipement soit mis au rebut conformément aux réglementations locales. En cas de doute, veuillez contacter le fournisseur.

## 6 Garantie

Le produit est garanti pendant une période de 2 ans contre tous vices de fabrication, de matériau et d'exécution. La garantie est offerte sous réserve d'un entretien courant, et elle ne couvre pas les problèmes mécaniques ou de calibrage qui résultent du manque d'entretien, de conditions de transport incorrectes ou de conditions de stockage inappropriées.

Fabriqué par 

Keeler Limited, Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire SL4 4AA Angleterre  
Numéro vert: 0800 521251 Tél: +44 1753 857177 Fax: +44 1753 827145

Distribué par

USA Sales Office, Keeler Instruments Inc, 3222 Phoenixville Pike, Building #50,  
Malvern, PA 19355 Etats-Unis

Numéro vert: 1 800 523 5620 Tél: 1 610 353 4350 Fax: 1 610 353 7814



2509-P-8019 Issue E

**Keeler**